

Artelac® Splash

Estimado usuario:

Gracias por elegir Artelac® Splash.

Es un producto ideal para calmar e hidratar de forma instantánea los ojos secos debidos a factores ambientales. Refresca y calma de forma natural los ojos secos y alivia los síntomas de ojos irritados, cansados, secos e incluso llorosos. Disponible en cómodas unidades monodosis, Artelac® Splash es una ola de frescor que proporciona hidratación instantánea a los ojos que se sienten cansados y en entornos agresivos.

- Es un colirio transparente
- No contiene conservantes
- Contiene el polímero ácido hialurónico (en forma de hialuronato sódico) que se encuentra en las estructuras naturales del ojo humano sano y de la película lagrimal
- Es adecuado para la humectación y rehumectación de lentes de contacto blandas y rígidas sin necesidad de quitárselas y mejora notablemente la comodidad de las lentes durante todo el día
- Es fácil de usar, bien tolerado y seguro

Por favor, lea atentamente estas instrucciones de uso; contienen información importante sobre el uso de este producto. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico o póngase en contacto con nosotros.

¡Desde Bausch + Lomb le enviamos nuestros mejores deseos para usted y sus ojos!

Composición:

1 ml de solución de Artelac® Splash contiene: ácido hialurónico (sal sódica de ácido hialurónico) al 0,2 %, cloruro de potasio, cloruro sódico, fosfato disódico dodecahidrato, dihidrofosfato sódico dihidrato y agua para inyección. Artelac® Splash no contiene conservantes.

Presentación:

Artelac® Splash está disponible en envases de 10, 30 o 60 unidades monodosis de 0,5 ml de solución.

Uso previsto de Artelac® Splash:

Lubricante ocular y para la humectación y rehumectación de lentes de contacto blandas y rígidas sin necesidad de quitárselas.

Artelac® Splash es el más adecuado para refrescar e hidratar los ojos secos debidos a factores ambientales externos. Entre estos factores suelen incluirse: uso prolongado del ordenador, ambientes interiores con aire acondicionado, falta de parpadeo, humo del tabaco y entornos exteriores con mucho viento.

Además, algunos fármacos (como la píldora anticonceptiva, los antihistamínicos, los betabloqueantes, los antiespasmódicos y los diuréticos), determinadas enfermedades o los conservantes que contienen algunos colirios pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de sequedad ocular.

Artelac® Splash proporciona hidratación para el alivio de los síntomas de ojo seco como la sensación de ojos irritados, secos o cansados, sensación de cuerpo extraño u ojos llorosos.

Debido a las propiedades de este producto, los usuarios con ojo seco crónico pueden beneficiarse de su uso.

¿Con qué frecuencia se puede usar Artelac® Splash?

Instile 1 gota de Artelac® Splash en el ojo cuando lo necesite.

Información importante sobre el uso de Artelac® Splash:

En casos poco frecuentes, este producto puede provocar reacciones de hipersensibilidad tales como reacciones alérgicas locales. En estos casos debe interrumpirse el tratamiento. No utilice el producto si es usted hipersensible a alguno de los componentes.

Información de seguridad para pacientes con daño grave de la córnea: en casos muy raros se notificaron depósitos de fosfato de calcio en la córnea durante el tratamiento con productos para uso oftálmico que contienen fosfato.


Con el fin de mejorar la tolerabilidad, Artelac® Splash no contiene ningún conservante, por lo que cada monodosis debe desecharse después de su uso. No utilice Artelac® Splash después de la fecha de caducidad.

No lo utilice si las unidades monodosis están dañadas.

Así es cómo debe usar Artelac® Splash:

Las ilustraciones muestran el uso sencillo y fácil de Artelac® Splash.


1. Sujete la unidad monodosis por la etiqueta y sepárela de la tira.

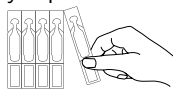

2. Gire la parte superior para abrir la monodosi.



3. Incline la cabeza hacia atrás ligeramente y tire suavemente del párpado inferior hacia abajo con un dedo de la mano libre. Colocando la monodosi lo más vertical posible sobre el ojo y con la boquilla hacia abajo, apriete suavemente la monodosi para aplicar una gota en el ojo.

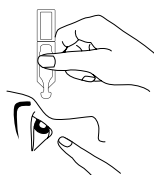

A continuación, cierre el ojo y muévelo a un lado y a otro. Después parpadee para que la gota se reparta bien por toda la superficie del ojo.

Evite que el extremo de la monodosi entre en contacto con el ojo o con los dedos, para impedir cualquier posible contaminación de la solución.

CE 0483



Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
D-13581 Berlin

www.bausch-lomb.de
Artelac es una marca de
Bausch & Lomb Incorporated o
sus filiales.
©Bausch & Lomb Incorporated

Distributor: Bausch & Lomb S.A.
Avda. Valdelaparra 4. 28108
Alcobendas (Madrid).



Conservar el producto
en un intervalo de
temperatura de +1 °C a
+25 °C



¡No use el producto
si los
envases unidosi están
dañados!



Fecha de caducidad



¡Siga las instrucciones
de uso!



Use los envases
unidosi
una sola vez.

LOT

Número de lote

STERILE A

Método de
esterilización,
aséptico

Los símbolos ®/™ son marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated o sus filiales
© Bausch & Lomb Incorporated

Información adicional sobre Artelac® Splash

Artelac® Splash también está disponible en envases multidosis sin conservantes.

Artelac® Splash, diciembre de 2015