

Lea cuidadosamente estas instrucciones de uso, ya que contienen información importante sobre la forma de utilizar el producto. Si tiene alguna duda, consulte a su especialista o póngase en contacto con nosotros.

**BAUSCH+LOMB**

# Artelac® Complete MULTIDOSIS

Hialuronato sódico al 0,24 %, carbómero, glicerol, componente lipídico (triglicéridos de cadena media), hidróxido de sodio y agua para inyección.

**Uso previsto:** lubricante ocular

## ¿Qué es Artelac® Complete?

**Artelac® Complete** es un colirio translúcido que contiene ácido hialurónico al 0,24 % (en forma de hialuronato sódico), carbómero, glicerol, componente lipídico (triglicéridos de cadena media) y agua para inyección.

Su avanzada formulación presenta una tolerabilidad muy elevada, ya que no contiene conservantes ni estabilizadores de pH.

El colirio se presenta en un avanzado e innovador envase multidosis sin conservantes (PFMD, por sus siglas en inglés), cuyo uso es más sencillo y seguro. Una vez abierto, puede utilizarse durante 6 meses.

## ¿Para qué se utiliza Artelac® Complete ?

**Artelac® Complete** es un lubricante ocular que contribuye al mantenimiento de las tres capas de la película lagrimal para mejorar la humectación de la superficie ocular cuando hay sensación de ojo seco.

## ¿Cuándo debe utilizarse Artelac® Complete?

**Artelac® Complete** está inspirado en el diseño de la película lagrimal natural. Contiene ácido hialurónico (en forma de hialuronato sódico), un humectante natural que se encuentra en las estructuras del ojo humano sano y en la película lagrimal natural, y dos humectantes adicionales: glicerol y carbómero. Al incluir un componente lipídico adicional (triglicéridos de cadena media), **Artelac® Complete** actúa sobre las tres capas de la película lagrimal: lipídica, acuosa y mucínica.

**Artelac® Complete** está diseñado para permanecer en la superficie del ojo y proporcionar la humedad necesaria para el alivio inmediato y duradero de los síntomas. Es un producto ideal para las personas que sufren diversos síntomas de sequedad ocular, como ojos cansados, con tensión, arenilla, quemazón u ojos llorosos.

La sequedad ocular está causada por:

- Factores externos como el uso prolongado del ordenador, el aire acondicionado, la calefacción y el humo del tabaco, así como el viento o el uso de lentes de contacto.
- Otros factores, como algunos fármacos (antihistamínicos, betabloqueantes, antiespasmódicos, diuréticos y píldora anticonceptiva) y enfermedades, pueden jugar un papel importante en la sequedad ocular.


## ¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se puede utilizar Artelac® Complete?

Instile una gota de **Artelac® Complete** en el ojo siempre que lo necesite.


Puede utilizarlo todos los días y con la frecuencia que desee. No hay ninguna limitación sobre el tiempo de uso.

## Cómo usar Artelac® Complete

**Atención. Antes de utilizarlo por primera vez o si hace algún tiempo que no utiliza el envase:** Quite el tapón y coloque el envase hacia abajo, presionándolo repetidamente hasta un máximo de 20 veces hasta que salga una gota. El envase estará ahora preparado para su uso.

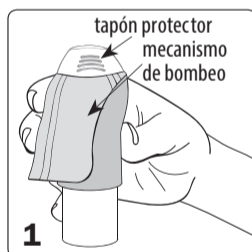


**1.** Lávese las manos antes de utilizar **Artelac® Complete** y sujételo como se muestra.

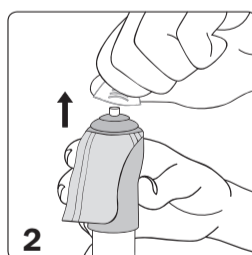

**2.** Antes de cada uso, retire el tapón protector de la parte superior del envase.


Procure que la punta del envase no entre en contacto con los dedos ni con ninguna otra superficie para evitar que la solución se contamine.

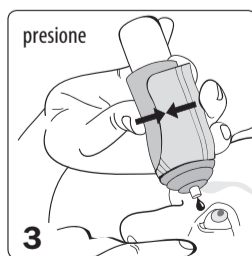

**3.** Coloque el envase hacia abajo e incline ligeramente la cabeza hacia atrás.

Tire suavemente del párpado inferior con un dedo de la mano libre, sujete el envase en posición vertical sobre el ojo y presione el mecanismo de bombeo para aplicar una gota en el ojo. Evite que la punta del envase entre en contacto con el ojo para prevenir posibles lesiones.

Cierre el ojo tras la aplicación, y lentamente muévelo para hacer que la gota se distribuya bien por toda la superficie del ojo.

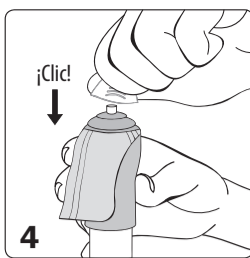

**4.** Después de aplicarse la gota, sacuda el envase para eliminar cualquier resto de producto que haya en la punta del mismo y vuelva a colocar el tapón protector sobre la punta seca.

El innovador mecanismo de bombeo de **Artelac® Complete** permite que la solución no contenga conservantes y facilita una aplicación cómoda.

**¿Cuándo no debe utilizarse Artelac® Complete?**

No utilice este producto si presenta hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

**Información importante sobre el uso de Artelac® Complete**

- En raras ocasiones se han registrado reacciones de hipersensibilidad local. Si esto sucediera, deberá interrumpirse el tratamiento.
- Este producto puede causar visión borrosa transitoria después de la instilación, lo que puede afectar negativamente a la conducción de vehículos o al manejo de maquinaria.
- No toque la superficie del ojo con la punta del envase para evitar posibles lesiones en la superficie ocular y que la solución se contamine.
- Sacuda el envase para eliminar las posibles gotas residuales después de cada aplicación.
- Utilizar el producto descuidadamente y de forma contraria a las instrucciones de uso, podría dar como resultado que el producto se resbale de las manos y cause una lesión ocular.
- Quítense las lentes de contacto antes de utilizar el producto.
- Espere unos 15 minutos antes de utilizar otro colirio o volver a colocarse las lentes de contacto.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad.
- No utilice el producto si observa que el envase está dañado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**Conservación de Artelac® Complete**

Guardar a temperaturas comprendidas entre +1 y +25 °C.

El diseño del envase le permite utilizar **Artelac® Complete** durante 6 meses tras la apertura.

**Presentación:**

**Artelac® Complete** se presenta en un colirio de 10 ml.

**Artelac® Complete** también está disponible en envases monodosis sin conservantes.




**Fabricante**

Dr. Gerhard Mann  
chem.-pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlín

**Distribuidor en España:**

Bausch & Lomb S.A.  
Avda. Valdelaparra, 4  
28108 Alcobendas - Madrid

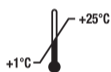

Conservar el producto en temperaturas comprendidas entre 1°C y 25°C



No utilizar si el envase o la unidad monodosis presentan daños



Consulte las instrucciones de uso



Fecha de caducidad



Desechar el producto 6 meses después de su apertura.



Lote



Método de esterilización aséptico

**Fecha de revisión del texto:** Junio 2017

Los símbolos ®/™ son marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated o sus filiales.  
© Bausch & Lomb Incorporated